

Descrizione

Questo kit include uno scudo di protezione del paziente da utilizzare con una barella o un altro dispositivo per il trasporto dei pazienti (indicato come "prodotto" nel presente manuale). È progettato per limitare il trasferimento di agenti patogeni tra il paziente e gli operatori del servizio medico di emergenza, il prodotto e l'ambiente. Il presente manuale fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la pulizia dello scudo.

Struttura: lo scudo di protezione del paziente è in cloruro di polivinile (PVC) plastico trasparente con nervature e cinghie di fissaggio. Per i prodotti con schienale regolabile, lo scudo può essere utilizzato con schienale sollevato o abbassato. Quando non viene utilizzato, lo scudo si ripiega contro il telaio del prodotto.

Ossigeno supplementare: l'erogazione di ossigeno supplementare al paziente tramite una maschera facciale del tipo NRB è necessaria quando viene utilizzato lo scudo per prevenire difficoltà respiratorie o soffocamento.

Conservazione: piegare lo scudo di protezione del paziente sul prodotto quando non viene utilizzato o rimuoverlo e riagganciarlo quando necessario.



AVVERTENZA

La mancata fornitura di ossigeno supplementare al paziente durante l'uso dello schermo del paziente può causare difficoltà respiratorie e soffocamento. Fornire ossigeno tramite una maschera facciale del tipo NRB.

Sganciare le cinture di fissaggio lunghe può far scattare le nervature dello scudo verso l'esterno e causare lesioni. Mantenere una presa salda sulle cinghie quando si fissa o si toglie lo scudo di protezione del paziente.

La modifica dello scudo di protezione del paziente può causare lesioni e danni. Utilizzare esclusivamente secondo la progettazione di Ferno.

Fissaggio dello scudo di protezione del paziente

Lo scudo è dotato di quattro cinturini corti di fissaggio, una serie di cinghie di fissaggio lunghe e due cinturini supplementari (figura 1).

1. Individuare aperture/forature/punti di presa adeguati sul telaio del prodotto per fissare i cinturini corti di fissaggio. Se il prodotto ha uno schienale, sollevarlo.
2. Fissare i due cinturini corti centrali al telaio del prodotto, centrati sul retro nel punto in cui si troveranno la testa e le spalle del paziente quando il paziente sarà sul prodotto. Far scorrere i due cinturini il più lontano possibile.
3. Fissare i due cinturini corti esterni utilizzando le aperture/impugnature aggiuntive, se disponibili. Far scorrere le cinture esterne lontano da quelle centrali fino al punto in cui la conformazione del prodotto lo consente.
4. Verificare che tutte le cinghie e i cinturini siano ben serrati e mantenere saldamente lo scudo contro il telaio del prodotto.
5. Fare attenzione quando si fissano le cinture di fissaggio lunghe per evitare che esse scattino verso l'esterno. Afferrare saldamente le due cinture lunghe, tirare lo scudo di protezione del paziente contro il telaio del prodotto e fissare le cinture. Se il prodotto ha uno schienale, fissare le cinture di fissaggio lunghe tra il meccanismo di regolazione dello schienale e la superficie del paziente come mostrato nella figura 1.
6. L'uso di cinturini supplementari è facoltativo. Fissarli, se necessario, alle aperture supplementari o alle traverse del prodotto.



Componenti forniti

Q.tà


Scudo di protezione del paziente

1

NOTA

Un'installazione non corretta del kit può causare danni al prodotto. Installare il kit solo come descritto nel presente manuale.

Lo scudo di protezione del paziente è progettato per essere utilizzato una sola volta, tuttavia può essere riutilizzato dopo un'adeguata pulizia e disinfezione. Sostituire lo scudo se danneggiato o se non è possibile eseguirne la pulizia.

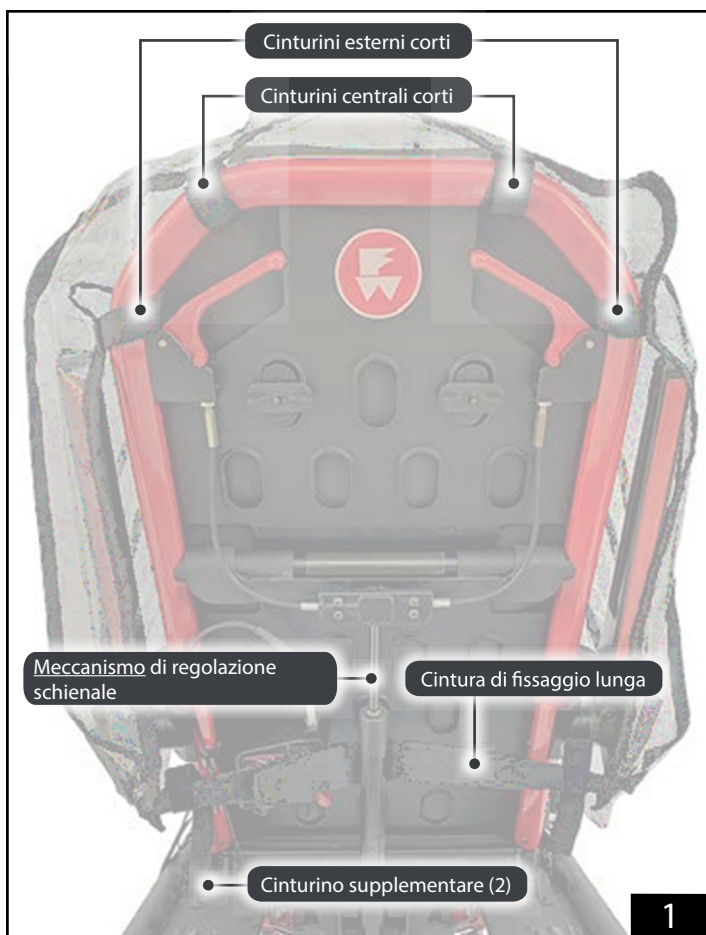

Uso dello scudo di protezione del paziente

1. Ripiegare lo scudo prima di spostare il paziente sul prodotto (figura 2).
2. Immobilizzare il paziente sul prodotto seguendo i protocolli medici d'emergenza approvati e le istruzioni del manuale d'uso del prodotto.
3. Se il prodotto ha uno schienale, regolarlo come necessario.
4. Fornire ossigeno supplementare al paziente utilizzando una maschera facciale di tipo NRB, seguendo i protocolli medici d'emergenza approvati.
5. Tirare lo scudo sulla testa e sul torace del paziente (figura 3).
6. Piegare lo scudo contro il telaio del prodotto prima di spostare il paziente dal prodotto.
7. Dopo l'uso, rimuovere lo scudo dal prodotto. Fare attenzione quando si scollega la cintura di fissaggio lunga. Pulire e disinfettare lo scudo prima del riutilizzo, oppure procedere con lo smaltimento.



NOTA

Lo scudo di protezione del paziente è progettato per essere utilizzato una sola volta, tuttavia può essere riutilizzato dopo un'adeguata pulizia e disinfezione. Sostituire lo scudo se danneggiato o se non è possibile eseguirne la pulizia.

Manutenzione

Ispezionare lo scudo di protezione del paziente dopo ogni utilizzo. Verificare che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni. Procedere con lo smaltimento dello scudo se il materiale risulta strappato, perforato od opaco, se le cuciture sono rotte oppure se le cinture e i cinturini sono danneggiati.

Disinfettare e pulire dopo ogni utilizzo seguendo i protocolli locali. Applicare il disinfettante su tutte le superfici seguendo le istruzioni del produttore del disinfettante per l'applicazione e il tempo di contatto. Asciugare con un panno pulito o lasciare aperto ad asciugare all'aria. Conservare o fissare all'apparecchiatura solo quando è pulita e asciutta.



Servizio clienti Ferno

Per assistenza sugli ordini o ulteriori informazioni:

CANADA E STATI UNITI

Telefono (numero verde)	1.877.733.0911
Telefono	1.937.382.1451
Fax (numero verde)	1.888.388.1349
Fax	1.937.382.1191
Sito web	www.ferno.com

TUTTI GLI ALTRI PAESI

Per ricevere assistenza o informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore Ferno. Se non avete un distributore Ferno, contattate Ferno Customer Relations presso Ferno-Washington, Inc., 70 Weil Way, Wilmington, Ohio 45177-9371, U.S.A.

Telefono	+1.937.382.1451
Fax	+1.937.382.6569
Sito web	www.ferno.com

Dichiarazione di garanzia limitata

I prodotti forniti da Ferno sono coperti da una garanzia limitata, riportata sulle relative fatture. I termini e le condizioni complete della garanzia limitata, nonché le clausole di limitazione ed esclusione dalle responsabilità, sono inoltre disponibili su richiesta contattando Ferno al numero 1.800.733.3766 oppure 1.937.382.1451.



Ferno-Washington, Inc.
70 Weil Way
Wilmington, Ohio 45177-9371, U.S.A.
1.937.382.1451

EC REP

FERNO S.r.l.
via B. Zallone, n. 26, 40066
Pieve di Cento, Bologna, Italy
+39.051.6860028